

rainbow Block 适应症

| 适应症 | 单冠 | | 桥体(3单位) | | 桥体 (≥ 4单位) |
|---------------|----|----|---------|-----|---------------|
| | 前牙 | 后牙 | 前牙桥 | 后牙桥 | |
| 瓷块 | | | | | |
| Shine | ● | ● | ● | ● | ○ |
| Shade / Trans | ○ | ● | ○ | ● | ● |

● recommend ○ Possible

产品规格信息

| 产品分类 | 直径 (mm) | 色系 | 厚度 (mm) | 规格 |
|---------|------------|----|------------|-----------|
| 台阶式 | Ø98 | A0 | 12 | SH9812WA0 |
| | | | 14 | SH9814WA0 |
| | | | 16 | SH9816WA0 |
| | | | 18 | SH9818WA0 |
| | | | 20 | SH9820WA0 |
| | | | 22 | SH9822WA0 |
| | | | 24 | SH9824WA0 |
| | | A2 | 12 | SH9812WA2 |
| | | | 14 | SH9814WA2 |
| | | | 16 | SH9816WA2 |
| | | | 18 | SH9818WA2 |
| | | | 20 | SH9820WA2 |
| | | | 22 | SH9822WA2 |
| | | | 24 | SH9824WA2 |



NEW PRODUCT

Smile

rainbow Shine Block

- 更广泛适用范围
- 超高的抗弯强度 (1100MPa, A0)
- A0, A0.5, A1, A2, A3, A4 共6色可选



Dentium Clinical Server



Dentium Mobile Homepage



Dentium Wechat

韩国: 8F, 9F, 76, Changnyong-daero 256beon-gil, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do T +82-31-888-5431
 北京: 顺义区林河大街22号院13号楼 (100102) T +86-10-8476-3053 F +86-10-8476-3053
 上海: 浦东新区周浦镇美罗花路500弄16号楼 (201318) T +86-21-5878-6737 F +86-21-6215-5955
 广州: 海珠区荔湾路368号广州之窗商务港10楼1001室 (510290) T +86-20-6232-5588 F +86-20-6232-5588
 23.01 [Rev.1]

www.dentium.com.cn

Dentium 登腾
For Dentists By Dentists

rainbow Shine Block

卓越的美学特性及超高的抗曲强度



更强

近似自然牙的透明度
及超高的抗曲强度(~1100MPa)





更透明

透光率~45%(A0基准)
适用于前牙美学修复



更广适应范围


前牙区、后牙区均可使用

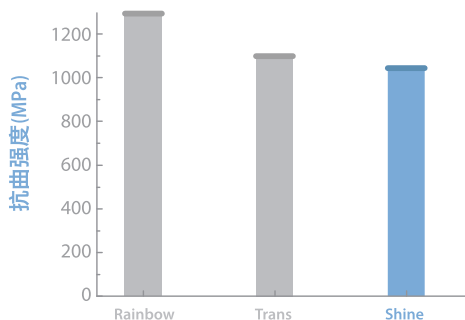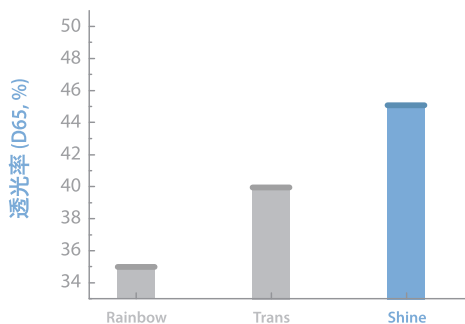

<登腾系列瓷块透光率&抗曲强度测试>

使用要点

① 备牙需超过1mm, 同时要避免出现倒凹、刃状肩台和尖锐转角

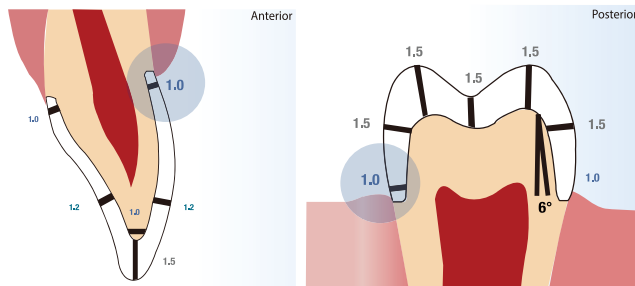

② 通过韧性更好的材料来固定氧化锆块, 增加了固定强度, 同时, 减少了震动可能引起的裂瓷、崩瓷现象

③ 全锆冠按照以下厚度及连接面积

| 类型 | 厚度(mm) | 连接面积(mm ²) |
|-------------------------|--------|------------------------|
| 1~2 个单位 | 0.5 | - |
| 3~4 个单位 (XOX, XOOX)* | 0.8 | 前牙区 ≥ 10 后牙区 ≥ 13 |

*X = 基牙, O = 桥体

④ 上瓷时, 修复体长度越长, 内冠和桥体厚度差距越大, 裂瓷的可能性越大, 所以设计时推荐厚度差异尽量小, 同时缓慢冷却 (每分钟少于55度)

⑤ 在病人有严重磨牙症, 极少备牙空间需要最大耐磨性的情况下, 推荐使用带有高韧性的rainbow Trans block/rainbow Shade block



临床病例

rainbow Shine Block 病例 1



刷染



最终修复



rainbow Shine Block 病例 2



刷染



最终修复



rainbow Shine Block 病例 3



刷染



最终修复



rainbow Shine Block 病例 4



刷染



最终修复

